



REGEN-SIL®

gel pentru tratamentul cicatricilor



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza **Regen-Sil, gel pentru tratamentul cicatricilor** chiar dacă ați mai utilizat acest dispozitiv medical. Este posibil ca aceste informații să se fi modificat de la ultima utilizare conform ultimelor cercetări în domeniu.

Acest dispozitiv medical poate fi eliberat fără prescripție medicală. Cu toate acestea, este necesar să utilizați **Regen-Sil, gel pentru tratamentul cicatricilor** cu atenție pentru a obține cele mai bune rezultate. Păstrați aceste instrucțiuni. Se poate să fie necesar să le recitiți.

Informații generale

Procesul natural de vindecare începe încă din faza de rănire a dermului, cel mai adânc strat al pielii. Odată cu rănirea dermului este declanșată, în mod normal, o cascadă de procese complexe. Aceste procese îndepărtează celulele lezate, protejează țesuturile viabile și ajută la regenerarea acestora, cu apariția cicatricii.

În funcție de reactivitatea individuală, unii pacienți pot prezenta cicatrici anormale, hiperdezvoltate, înroșite și rigide. Astfel de cicatrici sunt denumite cicatrici hipertrofice sau keloide.

Vergeturile sunt cicatrici care apar în urma întinderii pielii într-un timp scurt, fenomen întâlnit frecvent în sarcină, puseu de creștere la adolescenți, luare rapidă în greutate, creșterea masei musculare la sportivi.

Cicatricile pot fi inestetice, desfigurante, pot cauza mâncărime, perturbări de somn, durere, anxietate, depresie, care pot duce la întreruperea activităților zilnice.

Studii clinice au demonstrat că gelul cu siliconi ajută la scăderea sintezei de colagen de la nivelul cicatricilor anormale și, administrat conform instrucțiunilor de utilizare, reduce dimensiunile cicatricilor. Prin administrarea timpurie a gelului **Regen-Sil, gel pentru tratamentul cicatricilor** pe rana vindecată, se reduce semnificativ incidența cicatricilor anormale.

Informații despre produs

Gelul de siliconi este eficient pe numeroase tipuri de cicatrici, incluzând cicatrici acneice, chirurgicale, cicatrici după arsuri, tăieturi, răni rezultate din sport sau traumatisme și vergeturi.

Gelul formează pe piele o micro-membrană de silicon care inhibă pierderea de apă transepidermică și intensifică astfel procesul de hidratare locală și refacerea țesutului. Filmul de **Regen-Sil, gel pentru tratamentul cicatricilor** aderă la stratul cornos, protejează țesuturile de agenții chimici, fizici sau microbiologici și creează mediul optim de vindecare normală a cicatricii.

Regen-Sil, gel pentru tratamentul cicatricilor este un amestec de siliconi ce îmbunătățește aspectul, culoarea și textura cicatricilor și previne formarea cicatricilor hipertrofice și keloide. Reduce rigiditatea, dimensiunea, roșeața, mâncărimea și durerea ce însoțesc uneori procesul de cicatrizare.

Regen-Sil, gel pentru tratamentul cicatricilor ajută țesutul lezat să formeze o cicatrice matură normală și ameliorează aspectul inestetic al cicatricilor hiperdezvoltate.

Indicații

- Previne cicatrizarea inestetică și dezvoltarea excesivă a țesutului cicatricial.
- Atenuază și aplatizează cicatricile în relief.
- Estompează culoarea cicatricilor înroșite sau brunificate.
- Calmează pruritul și disconfortul asociat cicatricilor.

Beneficii

- Menține echilibrul hidric al pielii.
- Poate fi aplicat pe orice tip de cicatrice, de orice mărime și din orice zonă a corpului, inclusiv pe față, articulații și regiunile cu pilozități.
- Poate fi administrat în siguranță la copii, femei însărcinate sau care alăptează și la persoane cu fond sensibil.

Mod de administrare

Regen-Sil, gel pentru tratamentul cicatricilor se administrează la cât mai scurt timp după apariția cicatrizării țesutului lezat (de obicei 2-3 săptămâni după rănire sau operație).

Durata tratamentului poate varia între 8 săptămâni (pentru cicatricile noi) și 3-6 luni (pentru cicatricile vechi).


În cazul vergeturilor din sarcină, se recomandă începerea tratamentului cu **Regen-Sil, gel pentru tratamentul cicatricilor** din trimestrul II de sarcină și se continuă încă 2-3 luni după naștere.

Pentru celelalte tipuri de vergeturi, administrarea **Regen-Sil, gel pentru tratamentul cicatricilor** este indicată pe toată perioada în care pielea este tensionată și se continuă încă 2-3 luni după încetarea procesului.


Se aplică un strat subțire de **Regen-Sil, gel pentru tratamentul cicatricilor** pe zona cicatrizată, se masează ușor și se lasă să se usuce. Astfel se formează un film protector, flexibil, care permite pielii să respire, dar este impermeabil pentru apă. Dacă s-a aplicat prea mult gel, va dura mai mult timp până se va usca și există riscul ca hainele să se păteze. Se îndepărtează excesul de gel și se așteaptă să se usuce. Se formează un film transparent, aproape invizibil. Poate fi înlăturat prin spălare cu apă și săpun. Dacă se spală zona respectivă, se repetă administrarea, astfel încât cicatricea să fie în permanență în contact cu **Regen-Sil, gel pentru tratamentul cicatricilor**.

Efectele se observă după aproximativ 8 săptămâni; apariția acestora depinde foarte mult de reactivitatea individuală.


Mod de utilizare a tubului de 50 g

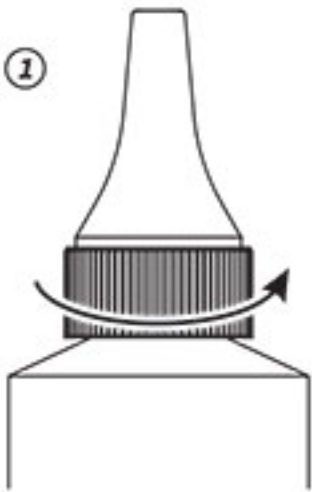

Pentru deschidere, rotiți capacul ușor spre dreapta. Veți auzi un clic. Continuați rotirea până veți simți o ușoară rezistență.

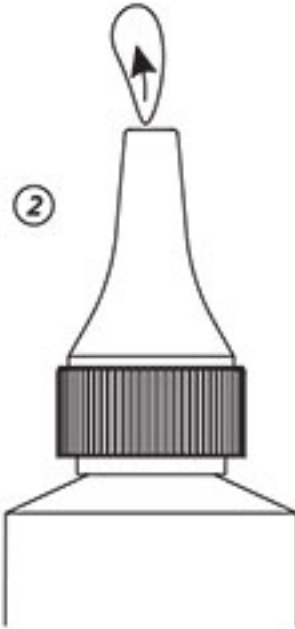

Aplicați cantitatea necesară de gel.

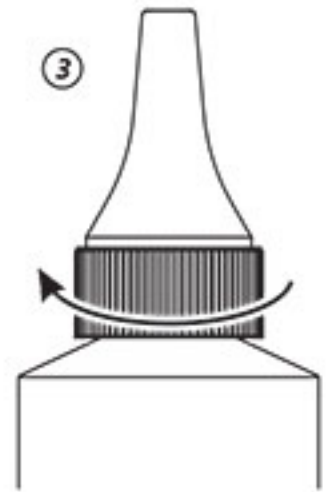

Pentru închidere, rotiți capacul ușor spre stânga până auziți un clic.

Atenționări și precauții

- Este doar pentru uz extern.
- Evitați contactul cu ochii și alte mucoase.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor.
- Dacă prezentați sensibilitate la ingrediente, experimentați inflamarea țesutului sau mâncărime severă, opriți administrarea și consultați un medic.
- Nu aplicați pe răni deschise sau arsuri de gradul III.
- Nu utilizați produsul în caz de hipersensibilitate la oricare dintre ingredientele produsului.
- Dacă ambalajul prezintă deteriorări ce compromit integritatea tubului, nu folosiți produsul.
- Nu aruncați ambalajul gol în mediul înconjurător.
- Păstrați la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Compoziție

Polidimetilsiloxan, polidimetilsiloxan crosolimer, trimetilsiloxisilicat.

Conținutul ambalajului

Cutie de carton cu un tub ce conține 15 g, 50 g sau 100 g gel și instrucțiuni de utilizare.


Data expirării

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate înscris pe ambalaj.

Regen-Sil, gel pentru tratamentul cicatricilor este un dispozitiv medical de clasă I, nesteril și fără funcție de măsurare, conform Directivei Consiliului European pentru dispozitive medicale 93/42/EEC.

Data la care aceste instrucțiuni au fost revizuite: octombrie 2015.

Producător:

 S.C. Look Ahead S.R.L.
Str. Libertății nr. 16, 700702, Iași, România,
Tel./Fax: 0232/252.800

